


# Spríevodca prípravou

## pracoviska pre prístroj NextSeq 550Dx

Úvod	3
Dodanie a inštalácia	4
Laboratórne požiadavky	4
Elektrické požiadavky	7
Neprerušiteľný zdroj napájania	8
Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia	8
Zabezpečenie siete a počítača	9
Sieťové opatrenia	9
Spotrebný materiál a zariadenia dodávané používateľom	14
História revízií	16
Technická pomoc	

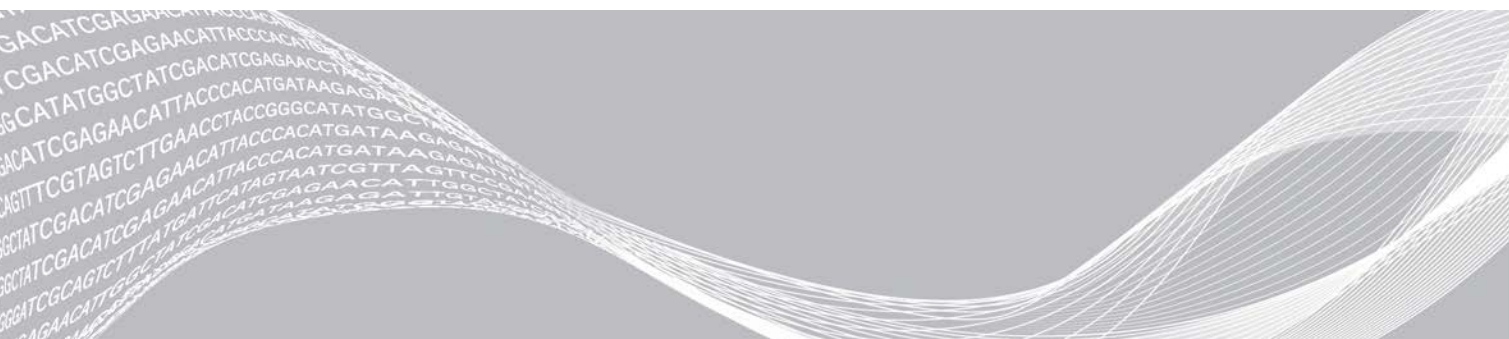

Tento dokument a jeho obsah sú vlastníctvom spoločnosti Illumina, Inc. a jej pridružených spoločností (ďalej len „Illumina“) a sú určené výlučne na zmluvné použitie u zákazníka v súvislosti s používaním výrobku (výrobkov) opísaného (opísaných) v tomto dokumente a na žiadny iný účel. Tento dokument a jeho obsah sa nesmú používať ani šíriť na žiadny iný účel a/alebo inak poskytovať, zverejňovať alebo reprodukovat' akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Illumina. Spoločnosť Illumina týmto dokumentom neposkytuje žiadnu licenciu na základe patentu, ochrannej známky, autorských práv alebo práv podľa zvykového práva, či podobných práv tretích strán.

Pokyny v tomto dokumente musia byť prísne a výslovne dodržiavané kvalifikovaným a riadne vyškoleným personálom, aby sa zabezpečilo správne a bezpečné používanie tu popísaného výrobku (výrobkov). Pred použitím takéhoto výrobku (výrobkov) je nutné prečítať si celý obsah tohto dokumentu s porozumením.

**NEPREČÍTANIE VŠETKÝCH POKYNOV TU OBSIAHNUTÝCH A ICH VÝSLOVNÉ NEDODRŽANIE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE VÝROBKU (VÝROBKOV), ZRANENIE OSOBY VRÁTANE POUŽÍVATELOV ALEBO INÝCH OSÔB, POŠKODENIE ĎALŠIEHO MAJETKU A ZRUŠENIE PLATNOSTI ZÁRUKY VZŤAHUJÚCEJ SA NA VÝROBOK (VÝROBKY).**

**SPOLOČNOSŤ ILLUMINA NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z NEBEZPEČNÉHO POUŽITIA TU POPÍSANÉHO VÝROBKU (VÝROBKOV) (VRÁTANE SÚČASTÍ ALEBO SOFTVÉRU).**

© 2021 Illumina, Inc. Všetky práva vyhradené.

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Illumina, Inc. alebo príslušných vlastníkov. Informácie o konkrétnych ochranných známkach nájdete na stránke [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Úvod

Táto príručka obsahuje špecifikácie a usmernenia na prípravu pracoviska na inštaláciu a prevádzku prístroja Illumina® NextSeq™ 550Dx:

- ▶ Laboratórne priestorové požiadavky
- ▶ Elektrické požiadavky
- ▶ Obmedzenia týkajúce sa prevádzkového prostredia
- ▶ Požiadavky na výpočtovú techniku
- ▶ Spotrebný materiál a zariadenia dodávané používateľom

## Bezpečnostné opatrenia

Dôležité informácie o bezpečnostných opatreniach nájdete v *Spríevodcovi zabezpečením a súladom prístroja NextSeq 550Dx s požiadavkami (dokument č. 1000000009868)*.

## Ďalšie zdroje

Z webovej lokality spoločnosti Illumina si možno stiahnuť túto dokumentáciu.

Zdroj	Popis
<i>Spríevodca bezpečnosťou a súladom prístroja NextSeq 550Dx s požiadavkami (dokument č. 1000000009868)</i>	Poskytuje informácie o bezpečnostných aspektoch prevádzky, vyhláseniach o spôsobilosti a označovaní prístrojov.
<i>Spríevodca súladom čítačky RFID s požiadavkami (dokument č. 1000000030332)</i>	Poskytuje informácie o čítačke RFID v prístroji vrátane osvedčení o zhode a bezpečnostných aspektov.
<i>Referenčná príručka prístroja NextSeq 550Dx vo výskumnom režime (dokument č. 1000000041922)</i>	Poskytuje pokyny na prevádzku prístroja a riešenie problémov. Na použitie pri používaní prístroja NextSeq 550Dx vo výskumnom režime s riadiacim softvérom NextSeq (NCS) v3.0.
<i>Príručka systému NextSeq 550 (dokument č. 15069765)</i>	Poskytuje pokyny na prevádzku prístroja a riešenie problémov. Na použitie pri používaní prístroja NextSeq 550Dx vo výskumnom režime s riadiacim softvérom NextSeq (NCS) v4.0 alebo novším.
<i>Referenčná príručka prístroja NextSeq 550Dx (dokument č. 1000000009513)</i>	Poskytuje prehľad komponentov prístroja, pokyny na prevádzku, údržbu a riešenie problémov s prístrojom.
<i>Pomocník BaseSpace (help.basespace.illumina.com)</i>	Poskytuje informácie o používaní sekvenčného centra BaseSpace™ Sequence Hub a dostupných možnostiach analýzy.

Ak chcete získať prístup k dokumentácii, možnosti stiahnuť si softvér, k online školeniu alebo často kladeným otázkam, navštívte na webovej lokalite spoločnosti Illumina [stránky s podporou pre NextSeq 550Dx](#).

## Dodanie a inštalácia

Autorizovaný poskytovateľ servisu dodá prístroj, vybalí komponenty a umiestni prístroj na laboratórny stôl. Zabezpečte, aby boli laboratórny priestor a stôl pripravené na dodanie prístroja.

Pri inštalácii, údržbe a servise sa vyžaduje prístup k USB portom prístroja.



### UPOZORNENIE

Prístroj môže vybalíť, nainštalovať alebo presúvať len autorizovaný člen personálu. Pri nesprávnej manipulácii s prístrojom sa môže narušiť zarovnanie, prípadne sa môžu poškodiť komponenty prístroja.

Prístroj nainštaluje a pripraví zástupca spoločnosti Illumina. Keď pripájate prístroj k systému na správu údajov alebo ku vzdialenej sieti, skontrolujte, či sa dráha na uchovávanie údajov zvolila ešte pred dátumom inštalácie. Počas inštalácie zástupca spoločnosti Illumina môže otestovať prenos údajov.



### UPOZORNENIE

Po tom, ako zástupca spoločnosti Illumina nainštaluje a pripraví prístroj, už prístroj **nepresúvajte**. Pri nesprávnom presúvaní prístroja sa môže narušiť optické zarovnanie a môže sa zhoršiť integrita údajov. Ak musíte prístroj premiestniť, obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Illumina.

## Rozmery zabaleného prístroja a obsah balenia

Prístroj NextSeq 550Dx sa prepravuje v jednej debne. Pozrite si rozmery uvedené nižšie, aby ste stanovili minimálnu šírku dverí, cez ktoré dokáže prejsť prepravná debna.

Miera	Rozmery zabaleného prístroja
Výška	97 cm
Šírka	90 cm
Hĺbka	94 cm
Hmotnosť	165 kg


V debne sa okrem prístroja nachádzajú aj tieto komponenty:

- ▶ prázdna fľaša na reagenty,
- ▶ kazeta s preplachovacou reagentiou a preplachovacím pufrom,
- ▶ adaptér BeadChip,
- ▶ napájací kábel,
- ▶ súprava s príslušenstvom, ktorá obsahuje tieto komponenty:
  - ▶ klávesnica a myš,
  - ▶ príbalový leták k prístroju NextSeq 550Dx (dokument č. 1000000041523).

## Laboratórne požiadavky

V tejto časti sú uvedené špecifikácie a požiadavky na nastavenie laboratórneho priestoru. Viac informácií nájdete v časti *Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia* na strane 8.

## Rozmery prístroja

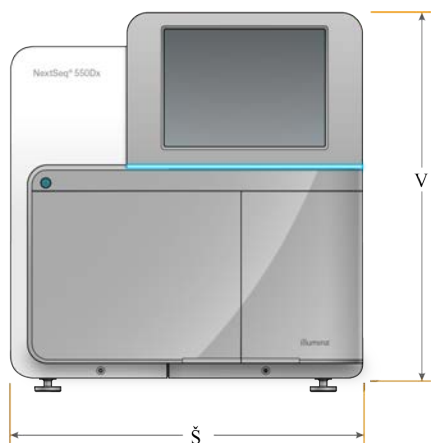

Miera	Rozmery prístroja (nainštalovaný)
Výška	58,5 cm
Šírka	54 cm
Hĺbka	69 cm
Hmotnosť	84 kg

## Požiadavky na umiestnenie

Prístroj umiestnite tak, aby bola možná správna ventilácia, aby ste mali prístup k vypínaču a sieťovej zásuvke a tiež prístup pri vykonávaní servisu.

- ▶ Uistite sa, že sa možno po ľavej strane prístroja dostať k vypínaču na zadnom paneli.
- ▶ Prístroj umiestnite tak, aby personál mohol napájací kábel rýchlo vytiahnuť z elektrickej zásuvky.
- ▶ Uistite sa, že k prístroju sa viete dostať zo všetkých strán.

Prístup	Minimálna vzdialenosť
Strany	Na každej strane prístroja ponechajte aspoň 61 cm.
Zadná časť	Za prístrojom ponechajte aspoň 10,2 cm.
Vrchná časť	Nad prístrojom ponechajte aspoň 61 cm.



### UPOZORNENIE

Pri nesprávnom presúvaní prístroja sa môže narušiť optické zarovnanie a môže sa zhoršiť integrita údajov. Ak musíte prístroj premiestniť, obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Illumina.

## Usmernenia pre laboratórne stoly

Prístroj obsahuje presné optické prvky. Prístroj umiestnite na pevný laboratórny stôl mimo zdrojov vibrácií.

Šírka	Výška	Hĺbka	Kolieska
122 cm	91,4 cm	76,2 cm	Voliteľné

## Usmernenia pre vibrácie

Úroveň vibrácií podlahy laboratória udržiavajte na štandarde VC-A 50  $\mu\text{m/s}$  pre frekvencie  $\frac{1}{3}$ -oktávového pásma 8 – 80 Hz alebo nižšie. Táto úroveň je typická pre laboratóriá. Neprekračujte (základnú) normu ISO pre operačné miestnosti 100  $\mu\text{m/s}$  pre frekvencie  $\frac{1}{3}$ -oktávového pásma 8 – 80 Hz.

Počas sekvenovania použite nasledujúce najvhodnejšie postupy na minimalizáciu vibrácií a zabezpečenie optimálneho výkonu:

- ▶ Umiestnite prístroj na rovnú tvrdú podlahu a v pracovnej uličke udržiajte voľný priestor.
- ▶ Na hornú časť prístroja nekladte klávesnice, použitý spotrebný materiál ani iné predmety.
- ▶ Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov vibrácií, ktoré prekračujú normu ISO pre operačné miestnosti, ako sú napríklad:
  - ▶ motory, čerpadlá, testery pretrepávania, prístroje na testovanie dopadu a silné prúdenie vzduchu v laboratóriu,
  - ▶ podlažia umiestnené priamo nad alebo pod ventilátormi vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení, ovládačmi a heliportmi,
  - ▶ stavebné alebo opravárenské práce vykonávané na tom istom poschodí, kde sa nachádza prístroj.
- ▶ Udržiavajte prístroj vo vzdialenosti najmenej 100 cm od zdrojov vibrácií, ako sú napríklad spadnuté predmety alebo pohyb ťažkých zariadení.
- ▶ Na prácu s prístrojom používajte len dotykovú obrazovku, klávesnicu a myš. Počas prevádzky nenarážajte priamo na povrch prístroja.

## Nastavenie laboratória na postupy PCR

Pri niektorých spôsoboch prípravy knižnice sa vyžaduje proces polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).

Pred začatím práce v laboratóriu vytvorte vyhradené oblasti a laboratórne postupy prevencie kontaminácie produktov PCR. Produkty PCR môžu kontaminovať reagenty, prístroje a vzorky, čo môže spôsobiť nepresné výsledky a oneskorenie bežných činností.

### Oblasti pre postupy pred PCR a po PCR

- ▶ Vytvorte oblasť pred PCR na procesy pred PCR.
- ▶ Vytvorte oblasť po PCR na spracovanie produktov PCR.
- ▶ Nepoužívajte rovnakú nádobu na umývanie materiálov pred PCR a materiálov po PCR.
- ▶ Nepoužívajte rovnaký systém čistenia vody v oblasti pred PCR a v oblasti po PCR.
- ▶ Spotrebný materiál použitý v protokoloch pred PCR uchovávajte v oblasti pred PCR a v prípade potreby ho preneste do oblasti po PCR.

### Vyhradené zariadenia a zásoby

- ▶ Nezdierajte zariadenia a zásoby medzi procesmi pred PCR a po PCR. V každej oblasti vyhradiť samostatnú súpravu zariadení a zásob.
- ▶ Vytvorte vyhradené skladovacie priestory na spotrebný materiál používaný v každej oblasti.

## Podmienky skladovania spotrebného materiálu na sekvenovanie

Položka (1 na chod)	Požiadavky na skladovanie
Pufer na riedenie knižníc	-25 °C až -15 °C
Kazeta s reagenciami	-25 °C až -15 °C
Kazeta s pufrom	15 °C až 30 °C
Kazeta s prietokovým článkom	2 °C až 8 °C

## Elektrické požiadavky

### Výkonové špecifikácie

Typ	Špecifikácia
Sieťové napätie	100 – 240 voltov striedavého prúdu @ 50/60 Hz
Menovitý výkon zdroja napájania	Maximálne 600 wattov

### Zásuvky

Vaša inštitúcia musí byť vybavená takto:

- ▶ **Pre 100 – 120 V striedavý prúd** – vyžaduje sa 15 A uzemnená, vyhradená sieť so správnym napätím a elektrickým uzemnením. Severná Amerika a Japonsko – zásuvka: NEMA 5-15
- ▶ **Pre 220 – 240 V striedavý prúd** – vyžaduje sa 10 A uzemnená sieť so správnym napätím a elektrickým uzemnením. Ak napätie kolíše o viac ako 10 %, je potrebný regulátor elektrického napätia.

### Ochranné uzemnenie



Prístroj je pripojený k ochrannému uzemneniu cez kryt. Bezpečnostné uzemnenie na napájacom kábli vráti ochranné uzemnenie do bezpečného stavu. Pripojenie ochranného uzemnenia na napájacom kábli musí byť pri používaní tohto zariadenia v dobrom prevádzkovom stave.

### Napájacie káble

Prístroj obsahuje medzinárodnú štandardnú zásuvku IEC 60320 C20 a dodáva sa s napájacím káblom špecifickým pre príslušný región.

Nebezpečné napätie sa z prístroja odstráni iba vtedy, keď sa napájací kábel odpojí od zdroja napájania striedavým prúdom.

Ak chcete získať ekvivalentné zásuvky alebo napájacie káble podľa miestnych noriem, obráťte sa na externého dodávateľa, ako je napríklad spoločnosť Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)).



#### UPOZORNENIE

Prístroj nikdy nepripájajte ku zdroju napájania pomocou predlžovacieho kábla.

### Poistky

Prístroj neobsahuje žiadne poistky, ktoré vymieňa používateľ.

## Neprerušiteľný zdroj napájania

Dôrazne sa odporúča neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) dodávaný používateľom. Spoločnosť Illumina nezodpovedá za prevádzku ovplyvnenú prerušením napájania bez ohľadu na to, či je prístroj pripojený k jednotke UPS. Štandardné napájanie záložným generátorom *môže byť* prerušené, takže pred obnovením napájania bežne dochádza ku krátkym výpadkom napájania.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčania, ktoré sú špecifické pre regióny:

Špecifikácia	APC Smart UPS 2200 VA LCD 120 V (Severná Amerika)	APC Smart UPS 1500 VA LCD 100 V (Japonsko)	APC Smart UPS 2200 VA LCD 230 V (medzinárodné)
Maximálny výkon	1920 W	980 W	1980 W
Vstupné napätie (menovité)	100 – 120 V striedavého napätia	100 V striedavého napätia	220 – 240 V striedavého napätia
Vstupná frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vstupné pripojenie	NEMA 5-20P	NEMA 5-15P	IEC-320 C20
Obvyklý čas chodu (300 W)	90 minút	51 minút	90 minút
Obvyklý čas chodu (600 W)	40 minút	17 minút	40 minút

Ak chcete získať ekvivalentný UPS, ktorý vyhovuje miestnym normám pre inštitúcie mimo uvedených regiónov, obráťte sa na externého dodávateľa, ako je napríklad spoločnosť Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)).

## Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Prvok	Špecifikácia
Teplota	Preprava a skladovanie: –10 °C až 50 °C. Prevádzkové podmienky: v laboratóriu udržiavajte teplotu od 19 °C do 25 °C (22 °C ±3 °C). Toto je prevádzková teplota prístroja. Počas prevádzky nedovoľte zmenu teploty prostredia o viac ako ±2 °C.
Vlhkosť	Preprava a skladovanie: nekondenzujúca vlhkosť v rozmedzí 15 – 80 %. Prevádzkové podmienky: udržiavajte nekondenzujúcu relatívnu vlhkosť v rozmedzí 20 – 80 %.
Nadmorská výška	Prístroj umiestnite v nadmorskej výške do 2000 metrov.
Kvalita vzduchu	Prístroj prevádzkujte v prostredí so stupňom znečistenia II alebo lepším. Prostredie so stupňom znečistenia II je definované ako prostredie, v ktorom sa bežne nachádzajú len neškodlivé znečisťujúce látky.
Ventilácia	Na základe špecifikácií týkajúcich sa tepelného výkonu prístroja si pozrite požiadavky na ventiláciu platné pre vaše oddelenie.
Vibrácie	Obmedzte kontinuálne vibrácie podlahy laboratória na kancelársku úroveň podľa normy ISO. Počas sekvenovacieho chodu neprekračujte limity operačnej miestnosti podľa normy ISO. Vyvarujte sa prerušovaniu otarasom alebo rušeniu v blízkosti prístroja.

## Tepelný výstup

Nameraný výkon	Tepelný výkon
600 wattov	2048 BTU/hodina



## Výstup šumu

Výstup šumu (dB)	Vzdialenosť od prístroja
< 70 dB	1 meter

Hodnota < 70 dB je v rámci úrovne bežnej konverzácie vo vzdialenosti približne 1 meter.

## Zabezpečenie siete a počítača

V nasledujúcej časti sú uvedené pokyny na údržbu zabezpečenia siete a počítača. Informácie o odporúčaných konfiguráciách nájdete v časti *Konfigurácie operačného systému na strane 12*.

### Antivírusový softvér

V rámci ochrany riadiaceho počítača pred vírusmi sa dôrazne odporúča používať antivírusový softvér podľa vášho výberu.

Strate údajov alebo prerušeniam prevádzky môžete predísť nasledujúcou konfiguráciou antivírusového softvéru:

- ▶ Nastavte manuálne kontroly. Nepovoľte automatické kontroly.
- ▶ Manuálne kontroly vykonávajte iba vtedy, keď sa prístroj nepoužíva.
- ▶ Nastavte tak, aby sa aktualizácie sťahovali bez povolenia používateľa, no aby sa nenainštalovali.
- ▶ Počas prevádzky prístroja nespúšťajte aktualizácie. Aktualizujte iba vtedy, keď prístroj nie je spustený a keď je bezpečné reštartovať počítač prístroja.
- ▶ Po aktualizácii počítač nereštartujte automaticky.
- ▶ Z ochrany súborového systému v reálnom čase vylúčte adresár aplikácií a údajovú jednotku. Toto nastavenie použite pre adresár C:\Illumina a jednotku D:\.
- ▶ Windows Defender je predvolene vypnutý. Nechajte ho vypnutý. Tento produkt systému Windows môže mať vplyv na počítačové zdroje, ktoré používa softvér spoločnosti Illumina.

## Sieťové opatrenia

Prístroj NextSeq 550Dx je určený na použitie so sieťou bez ohľadu na to, či sú chody v režime RUO pripojené k systému BaseSpace alebo v samostatnom režime.

Pri vykonávaní chodu v manuálnom režime sa na prenos údajov chodu do sieťového umiestnenia vyžaduje sieťové pripojenie. Ak chcete vykonávať chody v manuálnom režime, prístroj musí byť vo výskumnom režime. Neukladajte údaje chodu na miestny pevný disk prístroja NextSeq 550Dx. Pevný disk je určený na dočasné uchovávanie pred automatickým prenosom údajov. Všetky údaje uložené na pevnom disku, mimo aktuálneho chodu, zaplňajú pevný disk a zabraňujú spusteniu ďalších chodov až dovtedy, kým nebude k dispozícii dostatok miesta.

Internetové pripojenie sa vyžaduje pri týchto činnostiach:

- ▶ Pripojenie k sekvenčnému centru BaseSpace Sequence Hub spoločnosti Illumina.
- ▶ Inštalácia aktualizácií operačného softvéru NextSeq 550Dx (NOS) z rozhrania prístroja.
- ▶ [Voliteľné] Nahrávanie údajov o výkone prístroja.
- ▶ [Voliteľné] Pomoc na diaľku od oddelenia technickej podpory spoločnosti Illumina.

## Sieťové pripojenia

Pri inštalácii a konfigurácii sieťového pripojenia použite tieto odporúčania:

- ▶ Použite vyhradené 1-gigabitové pripojenie medzi prístrojom a systémom na správu údajov. Toto pripojenie môžete vytvoriť priamo alebo cez sieťový prepínač.
- ▶ Požadovaná šírka pásma na pripojenie je:
  - ▶ 50 Mb/s na prístroj na interné sieťové prenosy.
  - ▶ [Voliteľné] 50 Mb/s na prístroj na nahrávanie v sieti sekvenčného centra BaseSpace Sequence Hub.
  - ▶ [Voliteľné] 5 Mb/s na prístroj na nahrávanie údajov o výkone.
- ▶ Prepínače musia byť spravované.
- ▶ Sieťové zariadenia (napr. prepínače) musia mať minimálne 1 Gb/s.
- ▶ Vypočítajte celkovú kapacitu pracovného zaťaženia na každom sieťovom prepínači. Na kapacitu môže mať vplyv počet pripojených prístrojov a pomocných zariadení, ako sú napríklad tlačiarne.

Pri inštalácii a konfigurácii sieťového pripojenia použite tieto odporúčania:

- ▶ Ak je to možné, izolujte prenosy sekvenovania od iných sieťových prenosov.
- ▶ Káble musia byť CAT 5e alebo vyššej kvality. S prístrojom sa dodáva tienový CAT 5e sieťový kábel s dĺžkou 3 metre, ktorý je určený na sieťové pripojenia.
- ▶ Aktualizácie Windows nakonfigurujte tak, aby sa zabránilo automatickým aktualizáciám.
- ▶ Ak používate BaseSpace, používajte minimálne sieťové pripojenie 10 Mb/s.

## Domény sekvenčného centra BaseSpace Sequence Hub

Nasledujúce domény poskytujú prístup zo služby Universal Copy Service k údajom sekvenčného centra BaseSpace Sequence Hub a k údajom o výkone prístroja. Niektoré podnikové adresy obsahujú pole domény definované používateľom. Toto vlastné pole je rezervované pre názov domény {domain}.

Inštancia	Adresa
US Enterprise	{domain}.basespace.illumina.com
	{domain}.api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
EU Enterprise	instruments.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
AUS Enterprise	instruments.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.aps2.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.aps2.sh.basespace.illumina.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
	aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com

Inštancia	Adresa
US Basic and Professional	basespace.illumina.com
	api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
EU Basic and Professional	euc1.sh.basespace.illumina.com
	api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
AUS Basic and Professional	aps2.sh.basespace.illumina.com
	api.aps2.sh.basespace.illumina.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
	aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com
CG Basic and Professional	cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
	api.cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
	instruments.sh.basespace.illumina.com.cn
	cn-sh-cnn1-prod-seq-hub-data-bucket.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn

## Sieťová podpora

Spoločnosť Illumina neinštaluje sieťové pripojenia ani pre ne neposkytuje technickú podporu.

Pozrite si postupy údržby siete, či neexistujú potenciálne riziká kompatibility s prístrojom Illumina vrátane týchto rizík:

- ▶ **Odstránenie objektov skupinovej politiky (GPO)** – GPO môžu ovplyvňovať operačný softvér (OS) pripojených zdrojov spoločnosti Illumina. Zmeny v operačnom systéme môžu narušiť patentovaný softvér v systémoch Illumina. Prístroje Illumina sa otestovali a overili, či fungujú správne. Po pripojení k doméne GPO môžu niektoré nastavenia ovplyvniť softvér prístroja. Ak softvér prístroja nefunguje správne, obráťte sa na správcu IT v podniku a informujte sa o možnom rušení GPO.
- ▶ **Aktivácia Windows Firewall a Windows Defender** – tieto produkty Windows môžu ovplyvniť zdroje operačného systému, ktoré využíva softvér Illumina. V rámci ochrany riadiaceho počítača nainštalujte antivírusový softvér.
- ▶ **Zmeny v oprávneniach vopred nakonfigurovaných používateľov** – ponechajte existujúce oprávnenia pre vopred nakonfigurovaných používateľov. V prípade potreby zrušte dostupnosť vopred nakonfigurovaných používateľov.
- ▶ **Potenciálne konflikty IP adries** – prístroj NextSeq 550Dx má fixnú internú IP adresu, ktorá môže v prípade konfliktu spôsobiť zlyhanie systému.
- ▶ **Zdieľanie súborov servera Server Message Block (SMB)** – SMB v1 je predvolene zakázané. Ak ho chcete povoliť, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Illumina.

## Interné pripojenia

Pripojenie	Hodnota	Účel
Doména	localhost:*	Všetky porty na komunikáciu localhost-localhost, ktoré sú potrebné pri komunikácii medzi procesmi.
IP adresa	192.168.113.*:* (alebo */*)	Umožňuje všetky porty. Komunikačné prepojenie s firmvérom na sieťovej karte. Ak sa používa proxy server, musia sa rezervovať tieto IP adresy: 192.168.113.5 a 192.168.113.2. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Illumina.
Port	80 443	Local Run Manager (Správca lokálnych chodov)
	8081	Real-Time Analysis (Analýza v reálnom čase)
	8080	Operačný softvér NextSeq 550Dx (NOS)
	29644	Universal Copy Service (UCS)

## Výstupné pripojenia

Pripojenie	Hodnota	Účel
Doména	s3-external-1.amazonaws.com s3.amazonaws.com *.basespace.illumina.com	Sekvenčné centrum BaseSpace Sequence Hub alebo služba Illumina Proactive
Port	443	Sekvenčné centrum BaseSpace Sequence Hub alebo služba Illumina Proactive
	80	Sekvenčné centrum BaseSpace Sequence Hub alebo služba Illumina Proactive
	8080	Aktualizácie softvéru

## Konfigurácie operačného systému

Prístroje Illumina sa pred odoslaním testujú a overujú, či fungujú v rámci špecifikácií. Po inštalácii môžu zmeny nastavení spôsobiť riziká týkajúce sa výkonu alebo zabezpečenia.

Nasledujúce odporúčania súvisiace s konfiguráciou zmiernujú riziká týkajúce sa výkonu a zabezpečenia operačného systému:

- ▶ Nakonfigurujte heslo dlhé minimálne 10 znakov a použite ďalšie identifikátory vyplývajúce z lokálnych pravidiel pre ID. **Heslo si zaznamenajte.**
  - ▶ Spoločnosť Illumina neuchováva prihlasovacie údaje zákazníkov a neznáme heslá nie je možné obnoviť.
  - ▶ V prípade neznámeho hesla musí zástupca spoločnosti Illumina obnoviť predvolené nastavenia z výroby, čím sa zo systému odstránia všetky údaje a predĺži sa čas potrebný na poskytnutie pomoci.
- ▶ Pri pripájaní k doméne s objektmi skupinovej politiky (GPO) môžu niektoré nastavenia ovplyvniť operačný systém alebo softvér prístroja. Ak softvér prístroja nefunguje správne, obráťte sa na správcu IT v podniku a informujte sa o možnom rušení GPO.
- ▶ Použite bránu firewall systému Windows alebo sieťovú bránu firewall (hardvér alebo softvér) a vypnite protokol na vzdialený prístup k pracovnej ploche (RDP).

- ▶ Uchovajte oprávnenia správcu pre používateľov. Softvér prístroja od spoločnosti Illumina je nakonfigurovaný tak, aby umožnil pri dodaní prístroja používateľské povolenia.
- ▶ Systém má fixnú internú IP adresu, ktorá môže v prípade výskytu konfliktu spôsobiť zlyhanie systému.
- ▶ Riadiaci počítač je určený na ovládanie sekvenovacích systémov Illumina. Prehľadávanie webu, prezeranie e-mailov, práca s dokumentmi a iná činnosť nesúvisiaca so sekvenovaním spôsobujú problémy s kvalitou a zabezpečením.

## Služby

Softvéry NOS a Local Run Manager (Správca lokálnych chodov) využívajú nasledujúce služby:

- ▶ Analytická služba v softvéri Local Run Manager (Správca lokálnych chodov) spoločnosti Illumina.
- ▶ Pracovná služba v softvéri Local Run Manager (Správca lokálnych chodov) spoločnosti Illumina.
- ▶ Univerzálna kopírovacia služba spoločnosti Illumina

V predvolenom nastavení používajú tieto služby rovnaké prihlasovacie údaje ako pri prihlasovaní do softvéru NextSeq 550Dx. Informácie o zmene prihlasovacích údajov v softvéri Local Run Manager (Správca lokálnych chodov) nájdete v časti Zadanie nastavení kont služieb v *referenčnej príručke prístroja NextSeq 550Dx* (dokument č. 1000000009513).

## Mapovanie jednotiek

Nezdieľajte žiadne jednotky ani priečinky z prístroja.

Mapujte jednotky použitím servera Server Message Block (SMB) v2 alebo novšieho alebo Network File System (NFS).

V operačnom softvéri používajte na výstup chodu celú dráhu UNC.

## Aktualizácie systému Windows

Ak chcete zabezpečiť svoje údaje, odporúčame vám pravidelne inštalovať všetky dôležité bezpečnostné aktualizácie Windows. Keďže pri niektorých aktualizáciách sa vyžaduje reštartovanie celého systému, prístroj musí byť počas aktualizovania nečinný. Všeobecné aktualizácie môžu ohroziť pracovné prostredie systému a nie sú podporované.

Ak nie je možné vykonať bezpečnostné aktualizácie, namiesto služby Windows Update sú k dispozícii tieto alternatívy:

- ▶ odolnejšia ochrana pomocou brány firewall a izolácia siete (virtuálna sieť LAN),
- ▶ izolácia siete v sieti pripojeného úložiska (NAS), čo tiež umožňuje synchronizáciu údajov so sieťou,
- ▶ miestny ukladací priestor na USB jednotke,
- ▶ správanie a spravovanie používateľa s cieľom zabrániť nesprávnemu používaniu riadiaceho počítača a zabezpečiť príslušné ovládacie prvky na základe povolenia.

Ďalšie informácie o alternatívach služby Windows Update vám poskytne oddelenie technickej podpory spoločnosti Illumina.

## Softvér tretej strany

Spoločnosť Illumina podporuje iba softvér poskytnutý pri inštalácii. Neinštalujte Chrome, Java, Box ani iný softvér tretej strany, ktorý sa nedodal so systémom.

Softvér tretej strany nie je testovaný a môže ovplyvňovať výkon a zabezpečenie. Napríklad RoboCopy alebo iné synchronizačné streamingové programy môžu spôsobiť narušenie alebo zmiznutie sekvenovacích údajov, pretože interferujú so streamovaním, ktoré vykonáva riadiaci softvérový balík.

## Používateľské správanie

Riadiaci počítač prístroja je určený na ovládanie sekvenovacích systémov Illumina. Nepovažujte ho za počítač na univerzálne použitie. Z dôvodov kvality a zabezpečenia riadiaci počítač nepoužívajte na prehľadávanie webu, prezeranie e-mailov, prácu s dokumentmi ani inú nepotrebnú činnosť. Tieto činnosti môžu spôsobiť zhoršenie výkonu alebo stratu údajov.

## Požiadavka na veľkosť ukladacieho priestoru pre sekvenčné centrum BaseSpace Sequence Hub

Na základe veľkosti pamäte potrebnej na chod vyžaduje sekvenčné centrum BaseSpace Sequence Hub na jeden chod ukladací priestor s nasledujúcou veľkosťou:

Tabuľka 1 Parametre výkonu systému NextSeq 550Dx

Konfigurácia prietokových článkov	Dĺžka čítaní	Výstup	Požadovaný input
Prietokový článok s vysokým výkonom, do 400 M čítaní z jedného konca a 800 M čítaní z oboch koncov.	2 x 150 bp	100 – 120 Gb	100 ng–1 µg so súpravami na prípravu knižníc TruSeq
	2 x 75 bp	50 – 60 Gb	
	1 x 75 bp	25 – 30 Gb	
Prietokový článok so stredným výkonom, do 130 M čítaní z jedného konca a 260 M čítaní z oboch koncov.	2 x 150 bp	32 – 39 Gb	
	2 x 75 bp	16 – 19 Gb	

## Spotrebný materiál a zariadenia dodávané používateľom

V prístroji NextSeq 550Dx sa používajú nasledujúce spotrebné materiály a zariadenia. Viac informácií nájdete v referenčnej príručke prístroja NextSeq 550Dx (dokument č. 1000000009513).

## Spotrebný materiál na sekvenovanie

Spotrebný materiál	Dodávateľ	Účel
Alkoholové utierky, 70 % izopropyl alebo 70 % etanol	WWR, katalógové č. 95041-7144 (alebo ekvivalent) Všeobecný dodávateľ pre laboratóriá	Čistenie prietokového článku a všeobecné použitie
Laboratórna tkanina bez vlákien	WWR, katalógové č. 21905-026 (alebo ekvivalent)	Čistenie prietokového článku a všeobecné použitie

## Spotrebný materiál na údržbu a riešenie problémov

Spotrebný materiál	Dodávateľ	Účel
NaOCl, 5 % (chlórnan sodný)	Sigma-Aldrich, katalógové č. 239305 (alebo laboratórny ekvivalent)	Prepláchnutie prístroja pomocou manuálneho prepláchnutia po ukončení chodu; zriedený na 0,12 %
Tween 20	Sigma-Aldrich, katalógové č. P7949	Prepláchnutie prístroja pomocou možností manuálneho prepláchnutia; zriedený na 0,05 %
Laboratórna voda	Všeobecný dodávateľ pre laboratóriá	Prepláchnutie prístroja (manuálne prepláchnutie)
Vzduchový filter	Illumina, katalógové č. 20022240	Čistenie vzduchu, ktorý prístroj nasáva na účely chladenia

## Usmernenia pre laboratórnu vodu

Na vykonávanie postupov na prístroji vždy používajte laboratórnu alebo deionizovanú vodu. Nikdy nepoužívajte vodu z vodovodu. Používajte len tieto stupne vody alebo ich ekvivalenty:

- ▶ deionizovaná voda,
- ▶ Illumina PW1,
- ▶ voda s odporom 18 megaohmov ( $M\Omega$ ),
- ▶ voda Milli-Q,
- ▶ voda Super-Q,
- ▶ voda na molekulárnu biológiu.

## Zariadenia

Položka	Zdroj
Mraznička, -25 °C až -15 °C, beznámrazová	Všeobecný dodávateľ pre laboratóriá
Chladnička, 2 °C až 8 °C	Všeobecný dodávateľ pre laboratóriá

## História revízií

Dokument	Dátum	Popis zmeny
Dokument č. 1000000009869 v06	August 2021	Aktualizovala sa adresa autorizovaného zástupcu v Európskom spoločenstve.
Dokument č. 1000000009869 v05	November 2020	Aktualizovali sa sieťové opatrenia, sieťová podpora, interné pripojenia, výstupné pripojenia, konfigurácie operačného systému a časti antivírusového softvéru pre Windows 10, správca lokálnych chodov a zmeny kompatibility sekvenčného centra BaseSpace Sequence Hub. Aktualizovali a pridali sa domény BSSH. Pridali sa nové služby a požiadavky na veľkosť ukladacieho priestoru pre časť sekvenčného centra BaseSpace Sequence Hub. Do príručky na používanie boli pridané informácie sekvenčného centra o používaní s režimom RUO. Pridal sa vibračný prvok do tabuľky Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia a aktualizovala sa časť Usmernenia pre vibrácie. Pozrite si Sprievodcu najvhodnejšími postupmi zabezpečenia od spoločnosti Illumina.
Dokument č. 1000000009869 v04	December 2019	Aktualizovala sa adresa autorizovaného zástupcu v Európskom spoločenstve. Aktualizovala sa adresa austrálskeho zadávateľa.
Dokument č. 1000000009869 v03	Marec 2019	Upravilo sa formátovanie pre rýchlosť požiadavky na šírku pásma.
Dokument č. 1000000009869 v02	Január 2019	Pridali sa informácie pre kazety s prietokovým článkom NextSeq 550Dx High Output Flow Cell Cartridge v2.5 (300 cyklov). Aktualizovali sa pokyny na inštaláciu tak, aby v nich bolo uvedené, že sa vyžaduje prístup k USB portu. Upravili sa špecifikácie UPS na použitie v Japonsku.
Dokument č. 1000000009869 v01	August 2018	Aktualizovali sa regulačné označenia.
Dokument č. 1000000009869 v00	November 2017	Úvodné vydanie.



## Technická pomoc

Technickú pomoc vám poskytne technická podpora spoločnosti Illumina.

**Webová lokalita:** [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
**E-mail:** [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

Telefónne čísla oddelenia zákazníckej podpory spoločnosti Illumina

Región	Bezplatné	Regionálne
Severná Amerika	+1.800.809.4566	
Austrália	+1.800.775.688	
Rakúsko	+43 800006249	+43 19286540
Belgicko	+32 80077160	+32 34002973
Čína	400.066.5835	
Dánsko	+45 80820183	+45 89871156
Fínsko	+358 800918363	+358 974790110
Francúzsko	+33 805102193	+33 170770446
Nemecko	+49 8001014940	+49 8938035677
Hongkong, Čína	800960230	
Írsko	+353 1800936608	+353 016950506
Taliansko	+39 800985513	+39 236003759
Japonsko	0800.111.5011	
Holandsko	+31 8000222493	+31 207132960
Nový Zéland	0800.451.650	
Nórsko	+47 800 16836	+47 21939693
Singapur	+1.800.579.2745	
Južná Kórea	+82 80 234 5300	
Španielsko	+34 911899417	+34 800300143
Švédsko	+46 850619671	+46 200883979
Švajčiarsko	+41 565800000	+41 800200442
Taiwan, Čína	00806651752	
Spojené kráľovstvo	+44 8000126019	+44 2073057197
Ostatné krajiny	+44 1799 534000	

Karty bezpečnostných údajov (Safety data sheets, SDS) – k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Illumina na stránke [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).

Produktová dokumentácia – k dispozícii na stiahnutie z webovej lokality [support.illumina.com](http://support.illumina.com).



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 U.S.A.  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (okrem Severnej Ameriky)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com

CE



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
Holandsko

**Austrálsky zadávateľ**

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Austrália

**NA DIAGNOSTICKÉ ÚČELY IN VITRO**

© 2021 Illumina, Inc. Všetky práva vyhradené.

**illumina®**